

## KELASTIC Silikon Gel-Narbenfolie Anwendungshinweise:

KELASTIC Silikon Gel Narben Pflaster ist eine weiche, dünne, wiederverwendbare und selbstklebende Gel-Folie aus Silikon. Diese wird hauptsächlich aus medizinischem Silikon hergestellt. Es ist für die Behandlung sowohl bestehender als auch neuer hypertrophischer oder keloidaler Narben sowie als prophylaktische Behandlung geschlossener Wunden wirksam, um hypertrophe oder keloidale Narben zu verhindern. **NICHT AUF OFFENEN ODER NOCH NÄSSENDEN WUNDEN VERWENDEN.**

### Informationen:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Vorübergehende Verwendung bei sowohl bestehenden als auch neuen Hypertrophien oder Keloide Narben. Vorübergehende Verwendung als prophylaktische Behandlung geschlossener Wunden, um hypertrophe oder keloidale Narbenbildung zu verhindern. **NICHT AUF OFFENEN ODER NOCH NÄSSENDEN WUNDEN VERWENDEN.**

### Kontraindikationen:

Vermeiden Sie die Verwendung, wenn Sie auf Silikon allergisch reagieren.

### Anweisungen für die Verwendung:

1. Reinigen sie ihre Hände vor Gebrauch.
2. Reinigen Sie sanft den Wundbereich mit einer milden Reinigungslösung und spülen diesen mit sauberen Wasser. Trocknen Sie die Narbe und die umgebende Haut gründlich ab.
3. Nehmen Sie die Silikonfolie aus der Verpackung.
4. Schneiden Sie, falls erforderlich, die KELASTIC-Silikon-Folie auf die Narbengröße, mit einer schmalen Überlappung über der umgebenden Haut ab.
5. Entfernen Sie die Trennfolie von der KELASIC Silikon-Folie.
6. Anschließend die KELASTIC Silikon-Folie auf die Narbe kleben, ohne zu dehnen. Bei Bedarf kann eine leichte Bandage oder ein Klebeband verwendet werden, um die Silikonschicht zu fixieren.
7. Reinigen Sie die KELASTIC Silikon Gel-Folie, die Narbe und umgebende Haut mindestens einmal täglich mit milder Seife und in sauberem, warmem Wasser. Die KELASTIC Silikon Gel-Folie kann für 2-4 Wochen ununterbrochen wiederverwendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen:

1. Waschen Sie das Produkt zweimal täglich in einer milden, nicht öligen Seifenlösung (Babyseife wird empfohlen) und spülen Sie es mit warmem Wasser ab (gilt NICHT für die Narbenpflaster-Rolle). Nach dem Trocknen kann das Produkt erneut auf die Narben aufgetragen werden. Verwenden Sie kein reizendes Reinigungsmittel, da dies zu Hautreizungen führen kann. Papierprodukte sollten nicht zum Trocknen des Produkts verwendet werden, da diese auf der Gel-Folie haften können.
2. Die Narbenpflasterrolle bitte nur mit einem ganz leicht feuchtem Tuch reinigen. Das Pflaster muss auch nicht täglich gereinigt werden und muss beim Duschen nicht abgenommen werden. Das Silikonpflaster auf der Rolle ist so dünn (darin liegt das Geheimnis), das es entnommen bei übermäßiger Feuchtigkeit schaden nehmen könnte.
3. Bei warmem Wetter oder bei körperlicher Anstrengung, bei der Schwitzen auftreten kann, sollte das Produkt öfter gereinigt werden, um einen besseren Kontakt zwischen dem Produkt und der Haut zu gewährleisten.
4. Die Silikon-Gel-Folie sollte während der Therapiezeit mindestens 12 Stunden pro Tag aufgetragen werden, möglichst nicht weniger als 20 Stunden pro Tag. Um die Haut besser zu akklimatisieren, beginnen Sie mit der Anwendung des Produkts 4 Stunden pro Tag für die ersten zwei Tage, 8 Stunden pro Tag für die nächsten zwei Tage.
5. Erhöhen Sie die Verwendungszeit um zwei Stunden pro Tag, bis die optimale Therapiezeit von 24 Stunden pro Tag erreicht ist.
6. Um die Symptome von Unwohlsein und geringfügigem Juckreiz zu reduzieren, empfiehlt es sich, den Narbenbereich vor der Verwendung zu reinigen.
7. Vermeiden Sie Salben auf der zu behandelten Fläche, da diese die Wirkung des Produkts beeinträchtigen können.
8. Wenn sich die Wirkung Silikon-Gel-Folie zu verschlechtern beginnt oder die Reinigung schwierig ist, sollte es gewechselt werden. Nach einer kontinuierlichen Therapie von 2-4 Monaten kann ein guter Therapieeffekt erzielt werden.
9. Wenn auf der bedeckten Haut ein Hautausschlag beobachtet wird, kann sich die Therapiezeit verkürzen. Wenn der Ausschlag anhält, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

### **NICHT AUF OFFENEN ODER NOCH NÄSSENDEN WUNDEN TRAGEN.**

### Unerwünschte Reaktionen:

Nebenwirkungen, die möglicherweise durch folgenden Ursachen entstehen:

1. Oberflächliches aufweichen der Haut.
2. Hautausschlag
3. Juckreiz

### Lagerung:

Vor Sonneneinstrahlung geschützt bei Raumtemperatur lagern.

### Haltbarkeit:

Fünf Jahre

KELASTIC Silikon Narbenpflaster

KELASTIC Silikon Gel-Folie Narbenpflaster in verschiedenen Größen erhältlich:

KELASTIC Mastopexie Narbenpflaster

KELASTIC Silikon Narbenpflaster Rolle

12 x 8 cm (1,2 mm Stärke)

7,6 cm Durchmesser

25 x 10 cm (1,2 mm Stärke)

2,5 x 150 cm

### Kompressionsmieder Onlineshop

Walter Maar

Am Holzacker 47

91126 Schwabach

Tel. 0911 982060

Fax 0911 98206250

[www.kompressionsmieder-onlineshop.de](http://www.kompressionsmieder-onlineshop.de)

[info@kompressionsmieder-onlineshop.de](mailto:info@kompressionsmieder-onlineshop.de)